

5-2.リストバンドのID確認について

- 個別体調を管理するために、**作業者は決められたリストバンドを装着する**必要があります。
- 事前に作業員情報をご提出いただいた方は利用するリストバンドが、クラウドで紐づけられていますので、IDを確認して配布してください。
- 利用者の変更があった場合は、作業員情報を適宜変更してください。作業員情報の変更についてはP20-21をご確認ください。

体調管理システム GRIFFY wear <https://wear.griffy.ai> ※ログインについてはP8をご確認ください。



ログインID	氏名	拠点名	グループ名	デバイス種別①	デバイスID①	デバイス種別②	デバイスID②	役割
dusr002603	ユーザーマニュアル用作業員①	ユーザーマニュアル用	ユーザーマニュアル用	リストバンド (PWS)	88888			ユーザー
dusr002602	ユーザーマニュアル用グループリーダー①	ユーザーマニュアル用	ユーザーマニュアル用	リストバンド (PWS)	99999			

- ・氏名に紐づいているデバイスIDを確認
- ・リストバンド本体のIDを確認
※画面をダブルタップすると表示されます。
- ・登録されているデバイスIDのリストバンドを装着

ダブルタップで表示（表示見本）

ID 1 2 3 4 5

